



## СТОЙКА ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ НА РУКЕ

### Модели СЗК-1, СЗК-2, СЗК-3

#### 1. Технические характеристики

- 1.1. Каркас изготовлен из стального профиля 20\*20мм с нанесением полимерно-порошкового покрытия.
- 1.2. Ложе для руки обтянуто винилискожей с подкладкой из поролона (толщина 20мм).
- 1.3. Стойка регулируется по высоте.
- 1.4. Модель СЗК-1 без дополнительной полки и без колесных опор.
- 1.5. Модель СЗК-2 без дополнительной полки, на колесных опорах диаметр 50мм.
- 1.6. Модель СЗК-3 имеет дополнительную металлическую полку с нанесением полимерно-порошковой краски (съемная), стойка на колесных опорах диаметр 50мм.
- 1.7. Размеры изделия

Модель	СЗК-1	СЗК-2	СЗК-3
Габариты (Д*Г*В), мм.	450*450*600 (950)	450*450*600 (950)	450*450*600 (950)

- 1.8. Вес изделия без упаковки примерно 5 кг.

#### 2. Комплектность

- 2.1. Изделие поставляется в сборе.
- 2.2. В модели СЗК-3 в комплекте съемная металлическая полка.

#### 3. Инструкция по сборке

- 3.1. Освободить изделие от транспортной упаковки.
- 3.2. Установить стойку на ровную поверхность.
- 3.3. Произвести первичную дезинфекцию изделия специальными средствами.

#### 4. Рекомендации по эксплуатации

- 4.1. Допускается обработка поверхности любыми моющими средствами, не содержащих хлор и отбеливатель.
- 4.2. Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства.
- 4.3. Избегать длительного контакта с агрессивными жидкостями.
- 4.4. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания, избегайте резких рывков и ударов при его перемещении.
- 4.5. Не допускать механических повреждений.

#### 5. Правила эксплуатации

- 5.1. Изделие должно эксплуатироваться при температуре окружающей среды +10+35 градусов и относительной влажности 75-80%.
- 5.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, воздействия высоких температур.

#### 6. Примечание

- 6.1. Рабочая поверхность изделия в случае попадания на нее агрессивных химических веществ должна протираться с использованием нейтрализующих средств.

#### 7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение изделия в течение 24х месяцев при правильной эксплуатации.
- 7.2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

Все комплектующие изделия изготовлены из гигиенически сертифицированных материалов.

#### 8. Адрес предприятия-изготовителя:

620102, г.Екатеринбург, ул.Чкалова, д.3  
тел/факс +7 (343) 234-66-21  
<http://beregovoe.alltrades.ru>